


Varenr.	CH/FR	Lengde	Antall
AquaCath hydrofilt, Soft tip, Herre			
855159	Ch 12	40	30
884671	Ch 14	40	30
955169	Ch 16	40	30
945206	Ch 18	40	30

AquaCath hydrofilt, nelaton, kvinne

908715	Ch 08	15	30
984673	Ch 10	15	30
847762	Ch 12	15	30
907792	Ch 14	15	30
909946	Ch 16	15	30
870384	Ch 18	15	30

AquaCath hydrofilt, nelaton, Herre

947439	Ch 08	40	30
889039	Ch 10	40	30
813037	Ch 12	40	30
953490	Ch 14	40	30
949749	Ch 16	40	30
946841	Ch 18	40	30

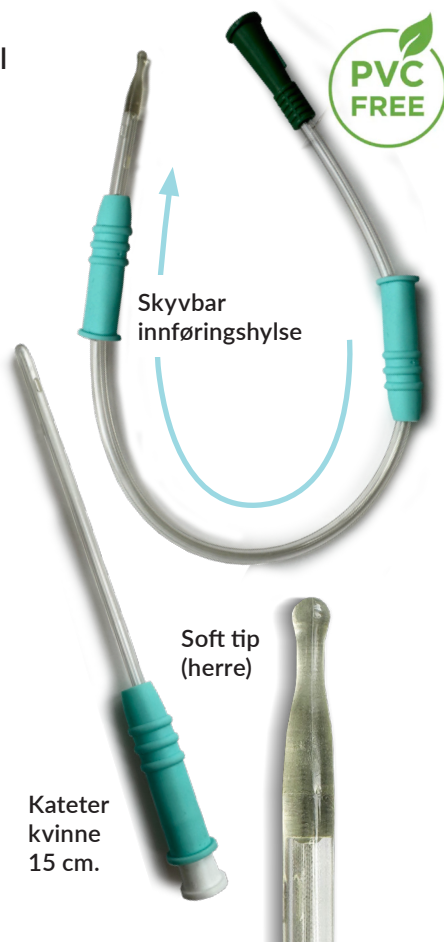

Adcare har et mål om å utvikle produkter som utgjør en forskjell for deg som sluttbruker.

Kontaktinformasjon:
Adcare AS
firmapost@adcare.no
Tel: 67 53 33 44

www.adcare.no/produkter/aquacath

Bestilling: Kontakt ditt nærmeste apotek eller bandagist



SERTIFISERT
VIRKSOMHET

adCARE
Din urologi spesialist.



Opplev komfort og trygghet med nyheten AquaCath!

NYHET! AquaCath – Smertefri tapping, hver gang!

- Mykt og skånsomt
- Unngå ubehag
- Innføringshylse for godt grep og god hygiene

Klar til bruk!



adCARE
Din urologi spesialist.

Klar til bruk!

- Den bevegelige innføringshylsen gjør det lettere å styre kateteret mot urinveisåpningen.
- Riller sikrer et godt grep og du slipper å ta på selve kateterrøret ved innføring.

- Den fleksible tuppen (herre) vil varsomt passere hindringer i urinrøret som innsnevring eller forstørret prostata.

- To glatte og polerte kateterøyne sørger for skånsom innføring.

- Det fleksible røret har et hydrofilt belegg som gjør kateteret klart til bruk og sørger for minimal friksjon.


- Dryppssikker. Unngå flekker på klær eller annet av coatingen.

Helsepersonell kan også bistå deg med råd for hvordan du skal bruke AquaCath. AquaCath er 100 % resirkulerbart. Fri for PVC, DEHP, BPA og naturgummilateks.

Før du starter kateterisering, vask alltid hendene grundig.


Ta kateteret forsiktig ut av pakken.

Unngå å ta på overflaten av selve kateterrøret.

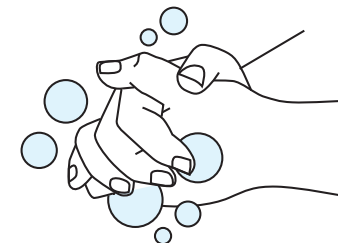

For menn:


Løft og trekk penis opp mot magen og trekk forhuden tilbake. Før deretter kateteret sakte gjennom urinrøret. Når urinen begynner å renne kan penis senkes. Kateteret kan da føres litt lenger inn. Når urinen ikke lenger renner trekker du kateteret langsomt ut.

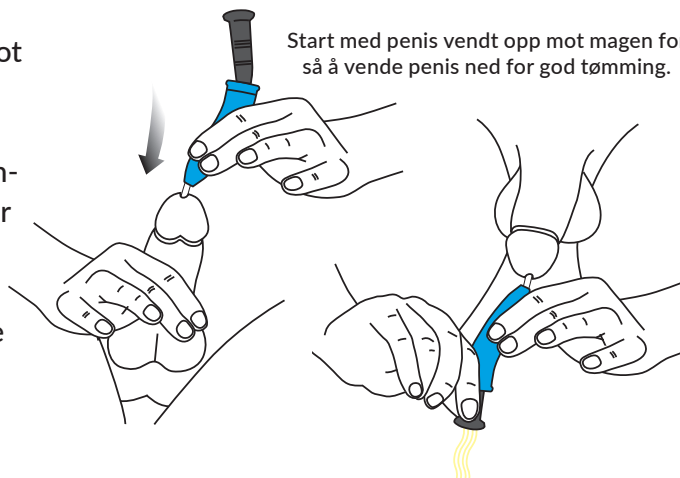

Start med penis vendt opp mot magen for så å vende penis ned for god tømning.

For kvinner:

Sitt på toalettet med bena godt fra hverandre. Hold kjønnsleppene godt fra hverandre med den ene hånden. Før så kateteret inn i urinrørsåpningen til urinen begynner å renne. Når urinen begynner å renne fører du kateteret litt lenger inn. Hold kateteret inne til det ikke kommer mer urin. Når urinen har stoppet å renne trekker du kateteret sakte ut for å oppnå god blæretømming.

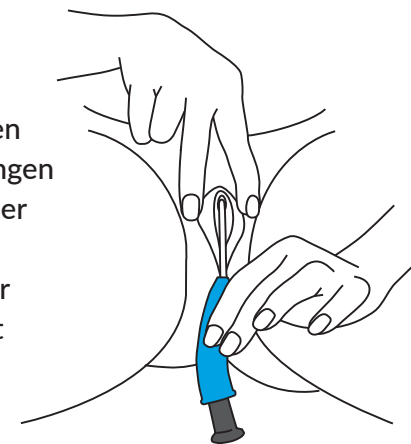

Kast kateteret i restavfallet etter bruk, Avslutt med å vaske hender.