



PureWick™

Eksternt kateter til kvinder

Har du en patient, der kunne være en god kandidat?

Patienter med behov for urinproduktionsovervågning, som ikke opfylder indikationerne for permanent Foley-kateterisation

Urininkontinens og/eller hyppig vandladning


Hudskader eller -irritation relateret til urininkontinens eller absorberende trusser

Immobilitet efter operation eller procedure

Beordret sengeleje


Problemer med at gå fra seng eller stol til toilet

Problemer med at bruge et sengebækken

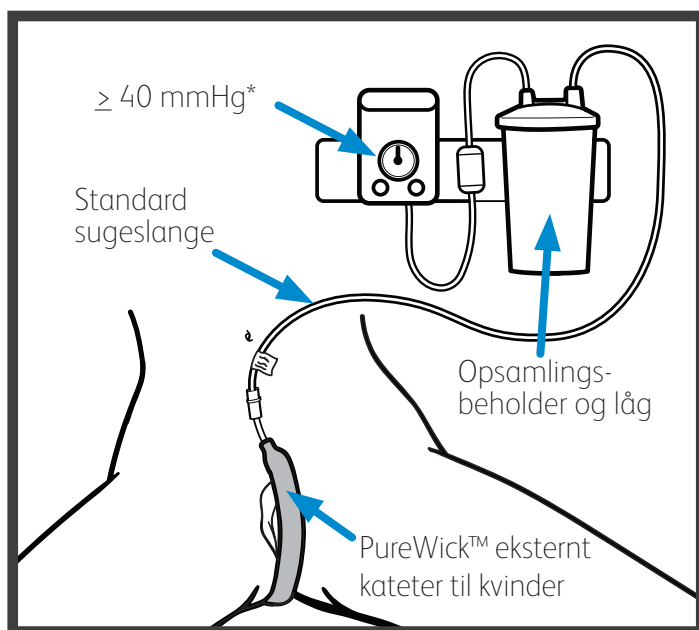

Tips og påmindelser ifm. anlæggelse og fjernelse†

- Udskift og udfør perineal pleje hver 8.-12. time, eller når det er tilsmudset.
- Adskil ben, sædemuskler og kønslæberne helt under anlæggelse og fjernelse. Sæt forsigtigt gazens bløde side mellem de adskilte balder og kønslæber.
- Hos de fleste patienter holder kroppen produktet på plads. For nogen patienter kan netundertøj være nyttigt til fastholdelse af PureWick™ eksternt kateter til kvinder.

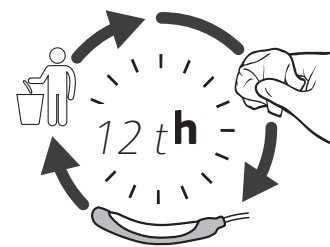


*Brug altid den mindst mulige grad af sug.

†Se venligst indlægssedlen for yderligere oplysninger.


PureWick™

Eksternt kateter til kvinder


Hvordan fungerer PureWick™ eksternt kateter til kvinder?

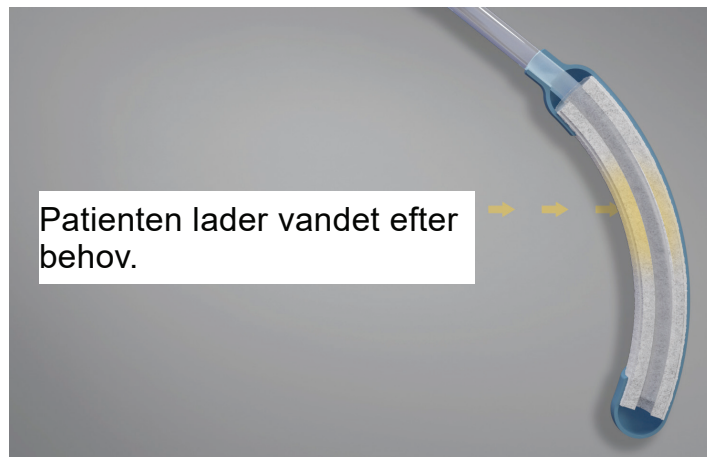


Efter korrekt anlæggelse af PureWick™ eksternt kateter til kvinder vil patienter kunne lade vandet efter behov.

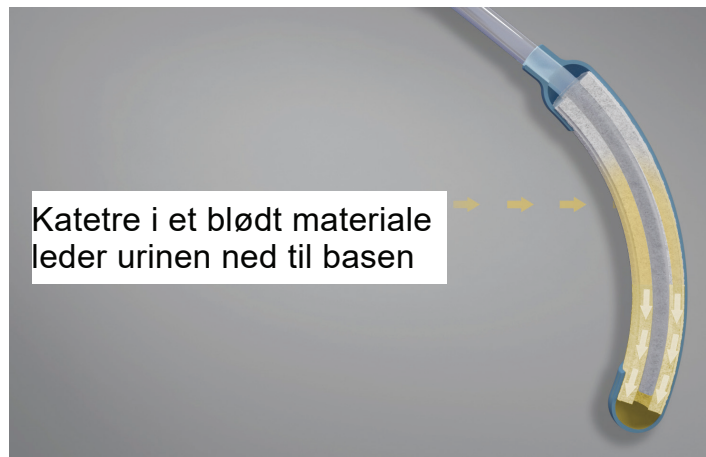

PureWick™ eksternt kateter til kvinder absorberer urinen og leder den ned i enhedens base.

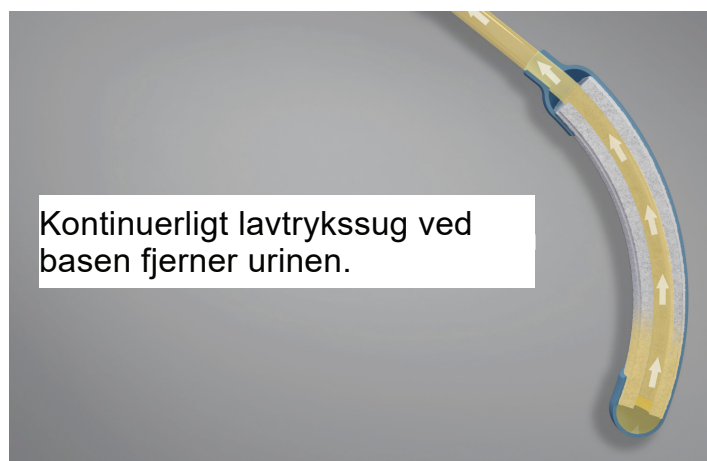

Lavtrykssuget trækker urinen væk fra enhedens base.

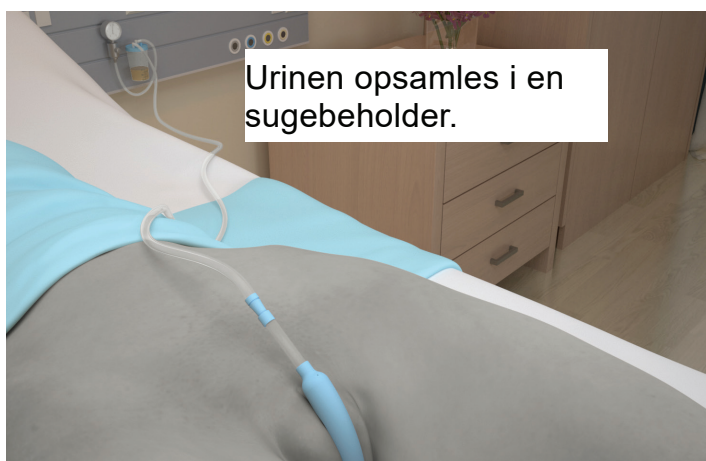

Urinen fjernes fra enheden og opsamles i den dertil egnede sugebeholder.

Indikationer: PureWick™ eksternt kateter til kvinder er beregnet til ikke-invasiv kontrol af urinproduktion hos kvindelige patienter.

Kontraindikationer: PureWick™ eksternt kateter til kvinder bør ikke bruges til patienter med urinretention.

Advarsler: For at undgå potentielle hudskader må man aldrig skubbe eller trække PureWick™ eksternt kateter til kvinder hen over huden under anlæggelse eller fjernelse. Indsæt aldrig PureWick™ eksternt kateter til kvinder i vagina, endetarmsåbningen eller andre kropsåbninger. Undlad at bruge PureWick™ eksternt kateter til kvinder sammen med sengebækken eller andre materialer, der ikke tillader tilstrækkelig ventilation. Afbryd brugen, hvis der opstår en allergisk reaktion. Efter brug kan dette produkt udgøre

en potentiel miljøfare. Bortskaffes i henhold til gældende lokale og nationale love og bestemmelser.

Se venligst indlægssedlen for mere detaljerede sikkerhedsoplysninger og brugsanvisninger.

bd.com

Becton Dickinson Denmark A/S, Lyskær 3EF, 1. sal., 2730 Herlev

BD, BD-logoet og PureWick er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company eller et af virksomhedens associerede selskaber. © 2025 BD. Alle rettigheder forbeholdes. BD-148757 (04/2025)

